



Instructiekaart

darmspoelen met Peristeen® Plus conuskatheter

Peristeen® Plus



Toiletta's
Voor het opbergen van het systeem*

Irrigatieslang
Vervang na 90 spoelingen

Schroefdop met deksel
Gebruiksduur: 90 spoelingen (deksel bewaren als u de waterzak vervangt)


Waterzak incl. temperatuur indicator
Vervang na 15 spoelingen

Gecoate rectale conuskatheter
voor éénmalig gebruik

Beenbanden
Vervang wanneer de elasticiteit minder wordt

Draaiknop
voor het reguleren van water


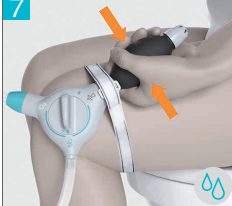
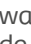


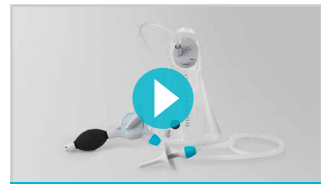











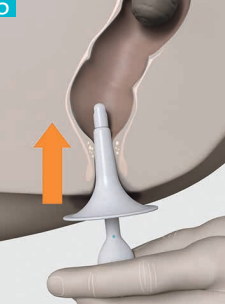


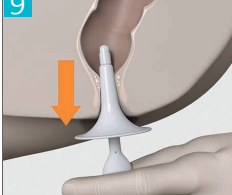Waterpomp
Vervang na 90 spoelingen



Bekijk de instructievideo op www.peristeen.nl

* Peristeen Plus is ook verkrijgbaar in een verpakking zonder toiletta's



<p>1</p>  <p>36-38°</p>	<p>A. Voorbereiding darmspoelen</p> <p>Open het deksel en vul de waterzak tot aan de rand met lauwwarm water. Tijdens het vullen zal de waterzak zich uitvouwen en daalt het waterniveau. Vul zondig bij. De ideale temperatuur om mee te spoelen is 36-38°C; dan is de indicator op de waterzak groen.</p>	<p>7</p> 	<p>C. Water pompen</p> <p>Draai de knop naar het watersymbool . Pomp langzaam de afgesproken hoeveelheid water _____ ml in uw darm.</p>
<p>2</p> 	<p>Bevestig de slang op het deksel; grijs op grijs. Duw en draai totdat deze goed vastzit.</p>	<p>8</p> 	<p>D. Verwijderen conuskatheter</p> <p>Zodra de afgesproken hoeveelheid water is ingebracht draait u de knop naar het ballonsymbool  om de waterstroom te stoppen.</p>
<p>3</p> 	<p>Open de verpakking van de conuskatheter 2 tot 3 cm en plaats de katheter in een beker met water. Wacht 30 seconden om de coating te activeren.</p>	<p>9</p> 	<p>Verwijder de conuskatheter en zorg dat deze niet in het toilet valt.</p>
<p>4</p> 	<p>Bevestig de slang met de turquoise connector aan de conuskatheter. Duw goed tegen elkaar en vergrendel. Plaats de waterzak binnen handbereik op de vloer en bevestig de controle unit op uw bovenbeen met behulp van de beenband.</p>	<p>10</p> 	<p>Draai de katheter los van de slang en gooi deze weg bij het restafval.</p> 
<p>5</p> 	<p>Draai de knop naar het watersymbool . Pomp water in de slangen.</p>	<p>11</p>  <p>30 min</p>	<p>E. De darm legen</p> <p>Maak de controle unit los van uw bovenbeen. Blijf op het toilet zitten. De darm begint vanzelf met legen. Het duurt gemiddeld 30 minuten voordat het ingelopen water met de ontlasting de darm heeft verlaten.</p>
	<p>Draai de knop terug naar rechts naar het ballonsymbool  om de waterstroom te stoppen, als alle lucht uit de slangen is.</p>	<p>12</p> 	<p>F. Schoonmaken</p>
<p>6</p> 	<p>B. Conuskatheter inbrengen</p> <p>Als u op het toilet zit brengt u de conuskatheter voorzichtig in. U kunt de conus vasthouden aan de vingergreep of onder de basis van de conus. Laat het breedste gedeelte van de conus buiten uw lichaam en houd deze vast tijdens het spoelen.</p>	<p>13</p> 	<p>Draai de knop naar het turquoise eindsymbool .</p> <p>Leeg de waterzak en hang de controle unit met de slangen op om te drogen. Was daarna uw handen.</p>

Uitleg symbolen

-  Turquoise watersymbool
-  Wit ballonsymbool
-  Grijs leegloopsymbool
-  Turquoise eindsymbool

Deze instructiekaart is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing.

Bent u al ingeschreven voor Peristeen Support? Kijk op www.peristeen.nl voor meer informatie.