

Valmistelu



34-40°C

1. Täytä vesipussi haalealla vedellä



Tyhjennä virtsarakko ennen huuhtelua.



2. Liitä osat yhteen.
Harmaa menee harmaaseen ja turkoosi yhdistetään turkoosiin.



3. Avaa katetrin pakkausta hieman.
Kiinnitä pakkaus lähellä olevaan seinään liimatäplien avulla.



4. Käännä valitsin turkoosiin vesisymboliin ja pumpppaa varovasti kunnes katetripakkaus on täynnä vettä. Se tekee katetrasta liukkaan. Laske hitaasti kymmeneen kolme kertaa.



Katetrin asettaminen



5. Käännä valitsin valkoiseen pallosymboliin. Älä pumpppaa vielä!

6. Pitele katetria sormiotteella turkoosin pisteen alapuolelta. Aseta se hitaasti peppuun niin, että sormikahva jää kehon ulkopuolelle.

Pitele katetria paikoillaan ja pumpppaa ilmaa palloon.

**Terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistama pumppaus-
ten määrä:**

Korkeintaan 2 pumppausta pientä katetria käytettäessä, tai 4 jos käytössä on vakiokokoinen katetri.

Kun pallossa on ilmaa, katetrin pitäisi pysyä paikoillaan ilman kiinni pitämistä.

Vedä katetria hellästi takaisinpäin tiivistääksesi pepun.



Älä käytä voimaa katetria laittaessasi. Jos tunnet yhtään vastustusta tai esteitä, lopeta ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai Coloplast® Care -palveluun.



Veden pumppaaminen



7. Käännä valitsin **turkoosiin vesisymboliin** ja pumpppaa vettä hitaasti. **Terveydenhuollon ammattilaisen suosittelema vesimäärä:**

_____ ml.

Varo ylittämästä **harmaata tyhjennyssymbolia**, tai pallo tyhjenee ja katetri saattaa pudota pois.

Poistaminen



8. Kun kaikki terveydenhuollon ammattilaisen suosittelema vesi on pumpattu, käännä valitsin **harmaaseen tyhjennyssymboliin** tyhjentääksesi pallon ja poistaaksesi katettrin.

Tyhjentäminen



9. Odota kärsivällisesti kunnes kakka tulee WC-pönttöön.

Joskus vettä ja kakkaa tulee ulos hyvin pian. Toisinaan voi kestää kauemmin. Voit kysyä äidiltä tai isältä, jos voit pelata peliä tai katsoa videota puhelimella tai tabletilla odottaessasi WC:ssä.

Viimeistely



10. Käännä **katetri irti** ja heitä se roskiin. Käännä valitsin **lopetus- ja säilytysymboliin**. **Tyhjennä vesi** vesipussista ja letkuista.


Jos kakka ei tule ulos, voit auttaa painelemalla kevyesti masun päältä. Joskus voi jonkin ajan kuluttua tulla toinen kakka. Odota kunnes olet varmasti valmis.



11. Jätä vesipussi kuivumaan ja **pese kätesi**. Olet nyt valmis.

Huomautus vanhemmille

- Muistakaa antaa kaikkien laitteen osien kuivua ennen säilytykseen laittamista. Säilyttäkää laitetta kuivassa paikassa ja suojassa suoralta auringonvalolta.
- On erittäin tärkeää muodostaa ja ylläpitää hyvä rutiini. Toistakaa huuhtelu terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistuksien mukaisesti. Jos tarvitsette vinkkejä ja apua, olkaa yhteydessä koulutettuihin Coloplast Care -asiantuntijoihimme.

 Lue tuotteen mukana toimitetut käyttöohjeet aina ennen käyttöä.



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

www.coloplast.fi Coloplast-logo on Coloplast A/S:n rekisteröimä tavaramerkki. ©2021-05 Kaikki oikeudet pidätetään A/S. PM-13574



410N393141032