

Introduzione

Guida passo dopo passo (pediatrico)

Peristeen® Plus è progettato per agevolare l'evacuazione delle feci presenti nel colon inferiore e nel discendente. È indicato per le persone che soffrono di incontinenza fecale, costipazione cronica e/o necessitano di molto tempo per le procedure di gestione intestinale.


In qualità di membri di Coloplast® Care, tu e tuo figlio avrete accesso gratuito a un supporto telefonico dedicato, con consigli e suggerimenti da parte di consulenti Coloplast Care qualificati.

Scopri come contattare il nostro servizio di assistenza tecnica Coloplast Care nell'ultima pagina di questa guida.



Peristeen® Plus

Preparazione

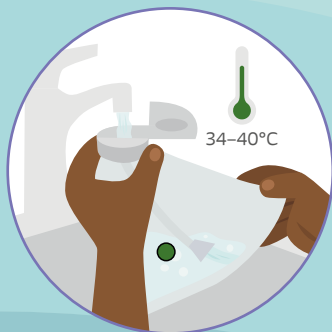


1. **Riempi completamente la sacca dell'acqua** con acqua tiepida.

2. **Quando l'indicatore della temperatura dell'acqua diventa verde** puoi iniziare l'irrigazione.



3. **Unisci le componenti.**
Il grigio va con il grigio.
Il turchese con il turchese.
Appoggia la sacca dell'acqua a terra.

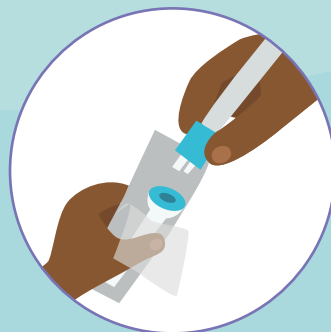


4. **Apri leggermente la confezione del catetere** dalla parte del connettore turchese e attaccala alla parete usando gli adesivi sul retro della confezione.



5. **Gira la manopola verso il simbolo turchese dell'acqua** e pompa con cautela finché **l'acqua non riempi la confezione del catetere**. Questo renderà il catetere pronto all'uso. **Conta lentamente fino a 10 per 3 volte.**



Svuota la vescica prima di iniziare l'irrigazione.

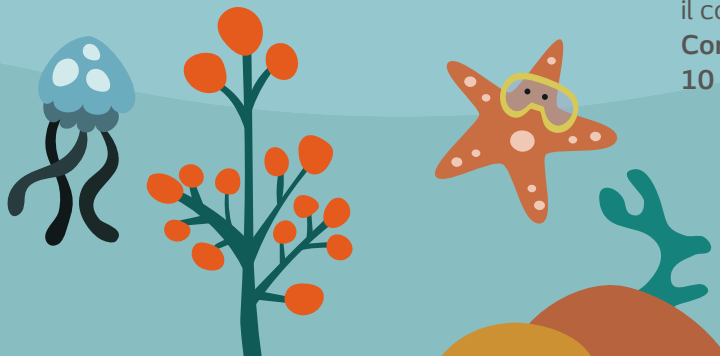


Inserimento del catetere



6. Gira la manopola sul simbolo bianco del palloncino, ma non pompare ancora!



Non forzare l'inserimento del catetere. Se senti una resistenza o un'ostruzione fermati e contatta il tuo professionista sanitario.

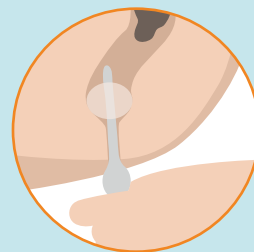

7. Afferra il catetere dall'impugnatura, ossia la parte larga sotto il punto turchese. **Inseriscilo lentamente** nel retto, lasciando l'impugnatura fuori dal corpo.

Tenendo sempre il catetere in mano, **pompa aria nel palloncino**.

Numero di pompate raccomandate dal tuo professionista sanitario:


(massimo 2 se usi il catetere small, oppure 4 se usi quello regular)

Ora che il palloncino è gonfiato, il catetere dovrebbe stare in posizione da solo.

Tira delicatamente il catetere indietro per sigillare il retto.




Pompaggio dell'acqua

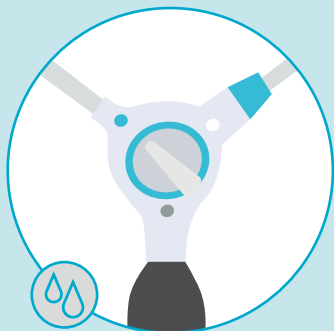

8. Gira la manopola sul **simbolo turchese dell'acqua** e inizia a pompare lentamente. **Volume di acqua raccomandato dal tuo professionista sanitario:** _____ ml.

Fai attenzione a non passare con la manopola sul **simbolo grigio di sgonfiaggio**, altrimenti il palloncino si sgonfierà e il catetere potrebbe sfilarsi.

Rimozione

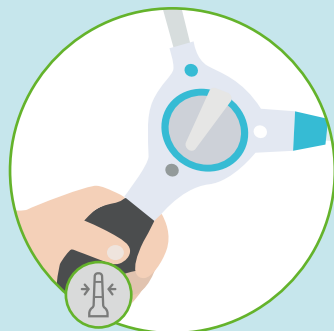

9. Quando avrai inserito tutta l'acqua che ti ha consigliato il tuo professionista sanitario, gira la manopola sul **simbolo grigio di sgonfiaggio** per sgonfiare il palloncino e rimuovere il catetere.


A volte l'acqua e la cacca escono molto presto, mentre a volte servirà un po' più di tempo. Puoi chiedere alla tua mamma o al tuo papà se puoi giocare o vedere un video sul telefono o tablet mentre aspetti sul WC.

Svuotamento



10. Aspetta pazientemente fino a quando sentirai di aver fatto tutta la cacca.

Se la cacca non esce puoi provare a premere un pò sulla tua pancia.

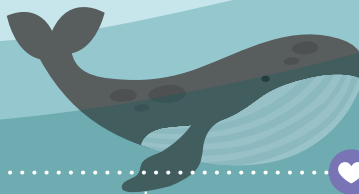

Pulizia



11.
Scollega il catetere
e buttalo nel cestino.

Gira la manopola
sul **simbolo di fine**
e **conservazione**.

Svuota la **sacca** e i tubi
dall'acqua rimasta.



12.
Lascia la sacca dell'acqua
ad asciugare e **lavati le**
mani. Hai finito.

Nota per i genitori

- Ricordate di lasciare asciugare tutte le componenti prima di conservarle in un posto asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.
- È molto importante sviluppare e mantenere una routine con la frequenza d'uso prescritta dal vostro professionista sanitario. Se avete bisogno di consigli e aiuto, non esitate a contattare i nostri operatori qualificati del servizio di assistenza tecnica Coloplast® Care.




Peristeen® Plus



- 1. Tappo a vite con coperchio**
Cambiare dopo 90 utilizzi
Ricordati di tenere il coperchio quando cambi la sacca dell'acqua
- 2. Sacca dell'acqua con indicatore della temperatura**
Cambiare dopo 15 utilizzi
- 3. Unità di controllo**
Cambiare dopo 90 utilizzi
- 3a. Pompa per il gonfiaggio del palloncino e il pompaggio dell'acqua**
- 3b. Manopola per la regolazione dell'aria e dell'acqua**
- 4. Tubi**
Cambiare dopo 90 utilizzi
- 5. Cateteri con palloncino rettali prelubrificati**
Strettamente monouso
- 6. Laccetti**
Sostituire quando perdono elasticità
- 7. Pochette**
Per la conservazione del sistema

Simboli sull'unità di controllo

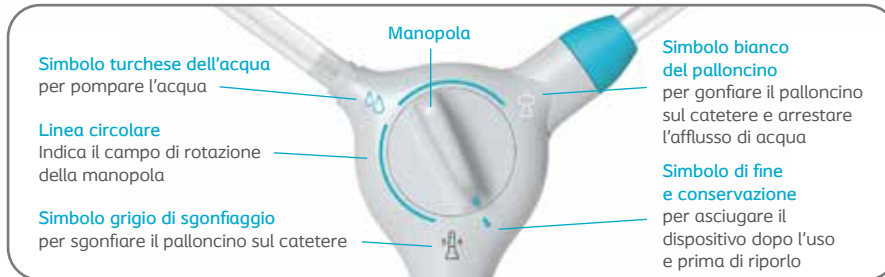

Bisogno di aiuto?

Se dovessi avere qualunque dubbio sull'utilizzo, prova a rileggere le istruzioni per l'uso contenute nella scatola di Peristeen Plus. Se non riuscissi a trovare la risposta, contatta il tuo professionista sanitario di riferimento o chiama il servizio di assistenza tecnica Coloplast Care.

Guarda il retro di questa guida per ulteriori informazioni su come entrare in contatto con il servizio di assistenza tecnica Coloplast Care.



Ospedale _____

Clinical Specialist di riferimento _____



Quantità d'acqua _____ ml **Frequenza utilizzo** _____

Iscriversi al nostro programma di supporto personalizzato Coloplast® Care è facile:



Contatta il numero verde di assistenza tecnica **800 064 064**.

In che cosa consiste il programma Coloplast Care?



Campionatura gratuita



Supporto telefonico
Attraverso operatori telefonici esperti e dedicati



Sito dedicato
Con articoli e consigli utili per la vita con Peristeen Plus



Materiale informativo
Su diversi argomenti collegati alla gestione intestinale



My Peristeen Check
Uno strumento semplice che ti permette di valutare la tua gestione intestinale, aiutandoti a identificare eventuali aspetti che andrebbero migliorati nel tuo uso periodico di Peristeen Plus



Tutti i nuovi iscritti riceveranno gratuitamente il nostro kit di benvenuto che include un asciugamano, un gel disinfettante mani e una confezione di bolle.

Aut. Min 0022675 del 29/03/2021-DGDMF-MDS-P

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast SpA via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 9 - Edi icio F - 40127 Bologna
www.coloplast.it Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S. © (03-2021) 450NI21020 Tutti i diritti sono riservati PM-16214

